



LIFECHIP INSTRUCCIONES DE APLICACION



PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN EN PERROS Y GATOS


Lea detenidamente las instrucciones en su totalidad antes de implantar el microchip y siga las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones y precauciones puede dar como resultado una entrega y un rendimiento inadecuados. Este producto está diseñado para ser implantado por o bajo la supervisión de un veterinario autorizado o de acuerdo con las leyes estatales. No utilice este producto si el paquete protector que contiene la jeringa precargada está rota o perforado, ya que la esterilidad podría verse comprometida.

Lugar de Implantación: Existen actualmente dos sitios reconocidos para implantación del microchip en Caninos y Felinos. **Se implanta en el espacio subcutáneo, en la línea media dorsal interescapular o en el lado izquierdo del cuello.**

Procedimiento:



1. Escanee con el lector en el sitio de implantación y alrededores para asegurar que el animal no ha sido previamente implantado.

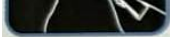

2. Escanee el microchip en el paquete para garantizar una lectura correcta y verificar que ese número escaneado coincida con el impreso en las etiquetas de código de barras.



3. Retire el inyector del envase y el capuchón superior de la aguja.




4. Asegúrese que el bisel de la aguja este mirando hacia Usted.



5. Limpie y prepare asépticamente la zona de implante.



6. Pellizcar la piel entre 1 o 2 dedos y el dedo pulgar. Inyectar la aguja inmediatamente por debajo del dedo pulgar.

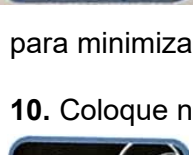

7. Una vez que la aguja está completamente debajo de la piel, presione el émbolo.

8. Mueva su dedo y su pulgar y pellizque la piel alrededor.



9. Aplique una ligera presión en el sitio de la implantación al retirar el dispositivo para minimizar cualquier sangrado.

10. Coloque nuevamente el capuchón de la aguja y deseche correctamente la aguja y la jeringa.



11. Escanee el animal para confirmar que el chip esté ubicado en forma segura.

12. Pegue la etiqueta del código de barras en los registros del animal y conserve el código para referencia futura.

13. El animal puede experimentar molestias locales leves, incomodidad similar a una inyección y puede mostrar signos de rigidez leve o dolor para unos días después de la implantación del chip. Es mejor implantar el microchip cuando tiene un día o dos libres de actividad extenuante.

14. Registre el número de microchip con asociando la especie y la raza apropiada en su base de datos preferida. Nosotros recomendamos registrarse **sin cargo** en RegistroAnimal.org Con el registro, recibirás inscripción de por vida en la base de datos, con actualizaciones gratuitas e ilimitadas para su Información y Contacto.

Por favor planifique en consecuencia